



eureva

onderdeel van  
medux

# Conform - Luchtkussens

## Product informatie

Conform® luchtkussens zijn vervaardigd van natuurrubber. Enkel het puurste rubber (24-015 NR groen) wordt gebruikt voor de productie van de luchtkussens. De gebruikte kwaliteit rubber is vrij van allergenen en voldoet aan alle eisen omtrent medische producten.

De luchtkussens zijn leverbaar in verschillende afmetingen en worden ingezet vanaf profylaxe fase tot decubitus wonden (Graad III/IV – Let op: Bij graad IV wordt zitten afgeraden). Ze bieden het hoogste zit-comfort, beperken het risico van drukwonden en kunnen therapeutisch ingezet worden bij bestaande huidproblemen. De hoge elasticiteit resulteert in drukverlaging; capillairen kunnen hierdoor beter worden doorbloedt.

Maximaal gebruikersgewicht 160 kg

Conform® luchtkussens worden standaard geleverd met een vuurvertragende katoen/lycra-stretch hoes met een anti-slip basis. De hoeken van de kussens zijn uitgerust met geïntegreerde metalen ogen ten behoeve van het gebruik van fixatie-materialen.



## Instructies voor het gebruik

De luchtkussens worden geleverd met een handpomp. Sluit de handpomp aan op het ventiel van de op te blazen luchtkamer (Afhankelijk van het type kussen zijn meerdere luchtkamers mogelijk). Open het ventiel door deze tegen de klok in te draaien. Pomp het kussen op tot deze bol komt te staan. Sluit het ventiel door deze met de klok mee te draaien.

Laat de gebruiker plaats nemen op het kussen en draai het ventiel open zodat er lucht kan ontsnappen. Sluit het ventiel wanneer de gebruiker comfortabel in het kussen is gezakt, maar deze niet met de zitbeenderen de onderzijde van het kussen kan raken.

Er wordt aangeraden een afstand van 2cm te houden tussen het laagste zitpunt (doorgaans tuberositas ischiadicus) en de onderzijde van het kussen. Wanneer het mogelijk is een hand tussen het laagste zitpunt en de onderzijde van het kussen te krijgen is het kussen goed ingesteld.

## Reiniging en onderhoud

Zowel Conform® luchtkussens als hoezen kunnen gewassen worden op 40°C - 60°C. Machinaal wassen van het kussen is mogelijk op 30°C - 40°C (zonder centrifugeer programma). Controleer voor het wassen altijd of de ventielen gesloten zijn!

**CONFORM**  
Med. Luftkissen-Systeme